

BETA DIAGNOSTICI

Crypto-Giardia-Entamoeba

Test rapido immunocromatografico su card per la rilevazione simultanea qualitativa di *Cryptosporidium*, *Giardia* e *Entamoeba* nelle feci.


- **MINIMA MANIPOLAZIONE**
- **FACILE INTERPRETAZIONE**
- **NESSUNA STRUMENTAZIONE**
- **SEMPLICE ANALISI DEL CAMPIONE**
- **INTERPRETAZIONE DIFFERENZIALE DEI TRE PARASSITI**

Cryptosporidium parvum, *Giardia Lamblia* e *Etamoeba Histolytica* sono i principali gruppi di protozoi che causano infezioni gatro-intestinali.



1. Rimuovere la card Crypto + Giardia + Entamoeba;
2. Miscelare per assicurare la dispersione del campione.
Rompere il tappo della provetta.
3. Usare una card per ogni campione. Dispensare 4 gocce nella finestra circolare della card.
4. Leggere i risultati 10 minuti dopo aver dispensato il campione.

Crypto Test A procedure

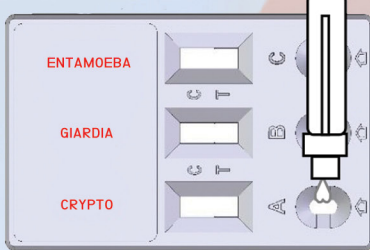

Giardia Test B procedure



Entamoeba Test C procedure



1.		Crypto, Giardia and Entamoeba negativi.
2.		Crypto and Giardia positivi.
3.		Crypto and Entamoeba positivi.
4.		Giardia and Entamoeba Positivi.
5.		Crypto positivo. Giardia and Entamoeba positivi.
6.		Giardia positivo. Crypto e Entamoeba negativi.
7.		Entamoeba positivo. Crypto and Giardia positivi.
8.	ogni altro risultato	Risultato NON Valido: either A, B or C, si raccomanda la ripetizione del test con un'altra card.

Sensitivity >99% and specificity >99% for Cryptosporidium.
Sensitivity 97% and specificity >99% for Giardia.
Sensitivity >99% and specificity >99% for Entamoeba.